

MicroGold[®]

Microneedling



Bruksanvisning

Läs instruktionen innan du använder apparaten!

Innehåll

Produktbeskrivning	2
Produktöversikt	3
Användning	4
Användning forts.	5
Inställning av nållängd	6
Inställning av hastighet	6
Behandlingen + Kontraindikationer	7
Batteridrift	11
Laddning av batteri	11
Nålkassetten	12
Specifikation	12
Att tänka på	13
Garanti	14


Produktbeskrivning

Detta är en microneedlingpenna och en engångskasset med nålar och en behållare för serum eller liknande. Bruksanvisningen beskriver varje del i detalj.

Pennan används för att förbättra hudens kvalitet och lyster, reducera fina linjer och andra ålderstecken. Nålarna skapar en kontrollerad skada i form av mikrokanaler i huden som sätter igång kroppens egna system för läkning och återuppbyggnad där nyproduktion av kollagen och elastin är viktigast. De ytliga mikrokanalerna underlättar upptaget av det hudserum som du använder.


Det finns 2 olika typer av kassetter till MicroGold Pen. Kassetterna används för microneedling- och nano-needlingbehandling.

Produktöversikt

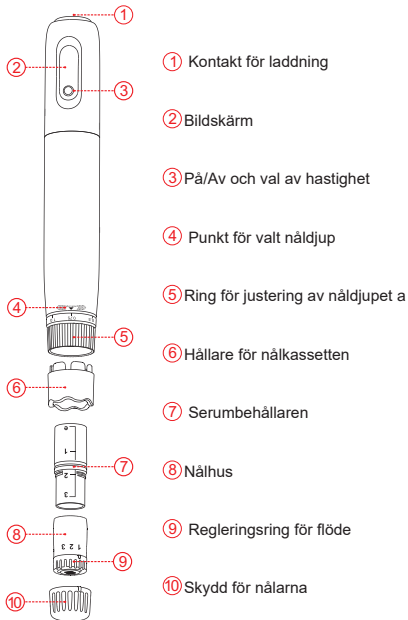

Användning kassett


Ta ut kassetten ur den sterila förpackningen [fig 1]

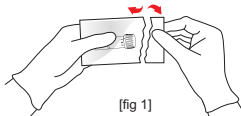


[fig 1]

Håll kassetten som i fig.2.
Fyll på serum.


[fig 2].

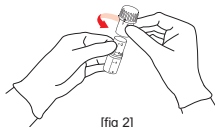

[fig 2]

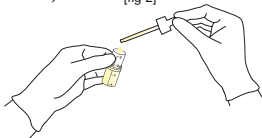

Skruva på överdelen ordentligt fig [3]

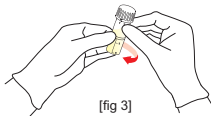


[fig 3]

Användning forts.

Ställ in flödet beroende på serumets konsistens.

1. Nålskyddet har en markering på nederdelen. Sätt den mot siffran 1 på behållaren. Reglera flödet genom att vrida skyddet till vänster eller höger. [fig 4]



Sätt markeringen på skyddet mot nivå 1 om serumet är tunt och mot nivå 3 om serumet är tjockt. [fig 5]

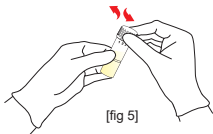

3. Ta bort nålskyddet.

4. Sätt kassetten på plats i pennan. [fig 6]


5. Sätt på ringen som håller kassetten på plats. [fig 7]

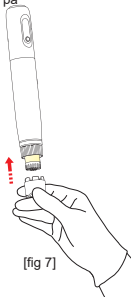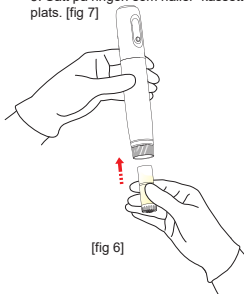

Inställning av nållängd

Välj nåldjup beroende på område och hudens kondition.

Ställ in nållängden genom att vrida på ringen som bilden visar. Detta ska göras när du har startat pennan. [fig 8] Se nedanstående avsnitt om Behandlingen.

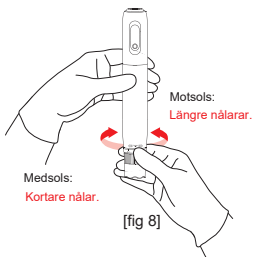

Inställning av hastighet

Hastighet



Tryck in knappen i 3 sekunder för att starta pennan. När pennan är igång, tryck lätt på knappen så ändras hastigheten för varje tryckning.

Behandling med MicroGold Pen

I detta avsnitt går vi igen vad som gäller själva handhavandet av MicroGold Pen oavsett vilken typ av behandling du ska göra.

Kontraindikationer

Om du lider av någon av nedanstående så ska du inte använda MicroGold Pen:

- Aktiv acne
- Blödarsjuka
- Inflammerad rosacea
- Epilepsi
- Benägenhet för Keloida ärr
- Svårinställd diabetes (du måste ha ett stabilt blodsocker först)
- Roaccutan behandling de senaste 6 månaderna (beroende av hudens skick)
- Svår dermatit
- Pågående infektion i kroppen och/eller huden
- Strålbehandling eller laserbehandling i området senaste året
- Gravida och ammande
- Blodförtunnande medicin
- Nedsatt immunförsvar – kan leda till infektioner efter behandling
- Du får inte ha behandlats med Botox eller liknande muskelavslappnande substanser 48 timmar innan MicroGold Pen, pga risk för feldisponering av injicerat toxin
- Fillers/Volymgivare – Minst 2 veckor mellan behandling med fillers och behandling med MicroGold Pen. Risk för inflammation

Behandlingsprotokoll

Steg 1. Rengör behandlingsområdet med lämplig rengöring.

Steg 2. Fyll kassetten med serum och reglera nåldjup och hastighet. Se sid

Rekommenderade nåldjup:

Panna: 0,25-0,5 mm

Näsa: 0,25 mm

Övre kindben: 0,25 mm

Kindben: 0,5 mm

Överläpp: 0,25 mm

Nederdel av kind: 0,5-1,0 mm

Haka: 0,5-1,0 mm

Val av hastighet

OMRÅDE	TUNN HUD	GROV HUD
Pannan	1-2	1-2
Näsan	1-2	1-2
Runt ögonen	1-2	1-2
Kindben	1-2	3-4
Kind och haka	3-4	5-6
Runt munnen	1-2	1-2
Läpparna	1-2	1-2

Behandlingsprotokoll

Steg 1. Rengör behandlingsområdet med lämplig rengöring.

Steg 2. Fyll kassetten med serum och reglera nåldjup och hastighet. Se sid 4-6

Rekommenderade nåldjup:

Panna: 0,25-0,5 mm

Näsa: 0,25 mm

Övre kindben: 0,25 mm

Kindben: 0,5 mm

Överläpp: 0,25 mm

Nederdel av kind: 0,5-1,0 mm

Haka: 0,5-1,0 mm

Steg 3. Under behandlingen

Försök att hålla MicroGold Pen vinkelrätt mot huden under behandlingen. Spänn ut huden med den lediga handens tumme och pekfinger

Apparaten ska hållas lätt an mot huden, inte tryckas. För instrumentet över huden i en lugn jämn hastighet, ca 5cm per sekund.

Behandla i 3 riktningar med raka rörelser (ej cirkulära)4-6

Steg 4. Efter behandling

Torka rent.

Avsluta behandlingen med en kylande Biofiber Mask.

Låt masken ligga på i ca 10-15min

Applicera en lugnande och vårdande kräm och avsluta med att lägga på en bra solskyddskräm +30 även när solen inte skiner.

Antal behandlingar

.....

Normalt krävs 3 -5 behandlingar med 2-4 veckors mellanrum. Som regel behövs det ett par behandlingar innan du börjar kunna se en förbättring. Full effekt får du efter 4-6 månader eftersom nybildning av kollagen är en långsam process. Upprepa efter behov.

Hygieniska rekommendationer för Microneedling

Det är ett absolut krav att använda en ny obruten förpackning av nålkassetten, Vid behandling penetreras huden och nålarna kan komma i direkt kontakt med kroppsvätskor. Om inte nålarna är sterila så finns stor risk för blodförgiftning och hepatit. Därför ska kassetten användas bara 1 gång oavsett om behandlingen sker på samma person vid olika tillfällen. Kassetten kan inte steriliseras igen Nålarna från MicroGold Pen är steriliserade.

Batteridrift


Pennan har ett inbyggt batteri så att du kan arbeta trådlöst. Medföljande kabel och adapter används för att ladda och när batteriet är tomt.

Laddning av batteriet

Anslut kabeln till adaptorn och kontakten på pennan. Sätt i kontakten i ett vägguttag eller liknande. Laddning tar upp till ca 2 timmar.

Hastighetssiffran börjar blinka när batteriet har 10% kvar.

Pennan stängs av automatiskt när hastighetslampan blinkat snabbt i 1 minut.

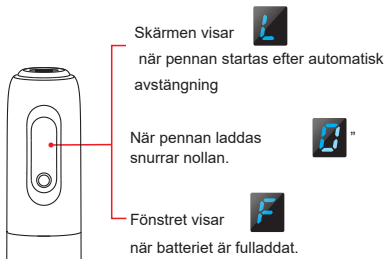

Nålkassett introduktion



Nano-R



12nålar

Dessa är alla engångskassetter.

Nålarna är tillverkade endast för MicroGold Pen.

Nålarna är steriliserade men bör torkas av med 75% sprit före användning.

Undvik att vända penna för att förhindra att serum kan rinna in i pennan.

Specifikation

Model namn : MicroGold Pen




















Adapter Input : 100-240V 50-60HZ Output : 5V \approx 2A

Vikt : 390 g Volym : 169*123*56 mm

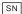Packlista

Produkt	Antal
Handenhet	1 st
Adapter	1 st
Manual	www.powercure.se
Strömkabel	1 st
Nålkassetter	2 st

Försiktighetsåtgärder

	Läs noga igenom hela instruktionen innan du startar		
	Do not apply it to the person as following: 1. Who has acute disease or bloody disease over 38 °C 2. Who has allergy and hemophilia 3. Who has melanosis of the face 4. Who has high internal heat 5. Who regularly visits hospital 6. Who takes medicines 7. Who is under 12 years old		
	Do not use it on the power other than AC 220V. It may cause fires or malfunction.		
	Do not use it near the place with high temperature, dust or humidity (Near the humidifier). It may cause malfunction.		
	Do not repair, disassemble or alter the controller and the body. It may cause malfunction.		
	Do not touch the device or detach the power cords with wet hands. It may cause electric shock.		
	Do not use the stripped cord or propped cord. It may cause fires(Be sure to replace it with another).		
	Do not use the propped cord which has crack or scares. It may cause scares on the skin.		
	When you don't use it for a long time, unplug it from the outlet.		
	Be sure to have an inspection for test. If any troubles are found, get it repaired.		
	No one other than the operator can touch it. It may cause accidents or malfunction.		
	Alternating current		Serial No
	Direct current		Manufacturer
	Date of manufacture		CE mark
	Attention, consult accompanying documents		Consult instruction for use

Garanti

Garantin gäller i 24 månader efter inköpsdatum.

Vi erbjuder utbytesservice från inköpsdatum.

Fullständiga garantvillkor hittar du på

www.powercure.se

OBS! Användning av nålkassetter från 3:dje part kan skada apparaten och upphäver garantin.

Dagligt underhåll

Kontrollera apparaten och nålkassetten innan du börjar behandlingen.

Stäng av apparaten när den inte används. Torka av ytan med en desinficerande våtservett.

Var särskilt noga att torka av området där nålkassetten fästes i pennan.

Undvik att förvara pennan och nålarna i hög temperatur och hög fuktighet.

Lämna inte pennan för reparation eller förändring till ej auktoriserad person.

Om du inte har använt pennan under lång tid, kontrollera att allt fungerar som det ska innan du använder den.

MicroGold Pen[®]